

RÉGLAGES DE LA TABLE (SUITE)

Dossier rembourré

1. Tenir enfoncée la manette du dossier, soulever le dossier rembourré vers le haut pour l'élever (Figure 15). La libération de la manette verrouillera automatiquement la table dans la position souhaitée.
2. Lors de l'actionnement de la manette du dossier vers le haut, pousser le dossier rembourré vers le bas pour l'abaisser.



AVERTISSEMENT : Régler le dossier avec soin

User de précautions lors de l'abaissement de la manette manuelle du dossier pendant qu'un patient est assis sur la table. Régler le dossier par incréments en abaissant et en libérant la manette. Le réglage du dossier en un seul mouvement pourrait provoquer des blessures au patient.



AVERTISSEMENT : Risque de chute

Si l'actionneur ne fonctionne pas comme prévu, aider le patient depuis la table et se reporter au manuel d'entretien.

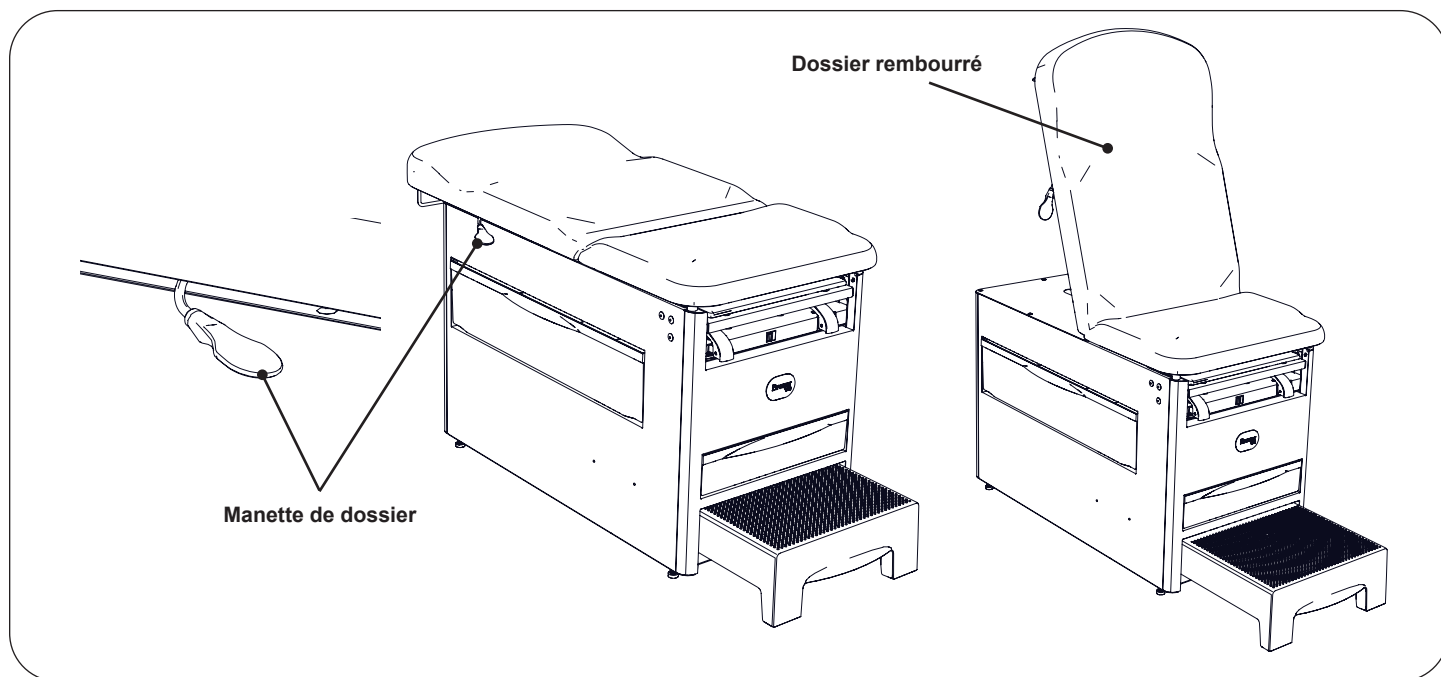


Figure 15. Utilisation du dossier rembourré

RÉGLAGES DE LA TABLE (SUITE)

Dispositif de surélévation de bassin (en option)

La fonctionnalité de surélévation de bassin permet de définir l'angle du siège à une position de 0° (horizontale) ou de 5° (surélévation).

Soulèvement du siège rembourré à la position de surélévation de bassin :

1. Soulever le bord avant du siège rembourré (Figure 16).
Faire tourner la barre de support de surélévation de bassin vers le haut jusqu'à sa position complètement verticale.
2. Abaisser le siège rembourré sur la barre de support de surélévation de bassin.

Rabaissement du siège rembourré à la position normale :

1. Soulever légèrement le bord avant du siège rembourré.
2. Faire tourner la barre de support de surélévation de bassin vers le bas et abaisser le siège rembourré dans sa position de décubitus ventral.

AVIS : Réglage du mécanisme de surélévation de bassin

Avant de régler le mécanisme de surélévation de bassin, faire descendre le patient de la table d'examen.



AVERTISSEMENT : Risque de pincement

Garder les mains bien éloignées de l'espace entre la partie supérieure rembourrée de la table et la partie meuble de la table lors du réglage des positions.

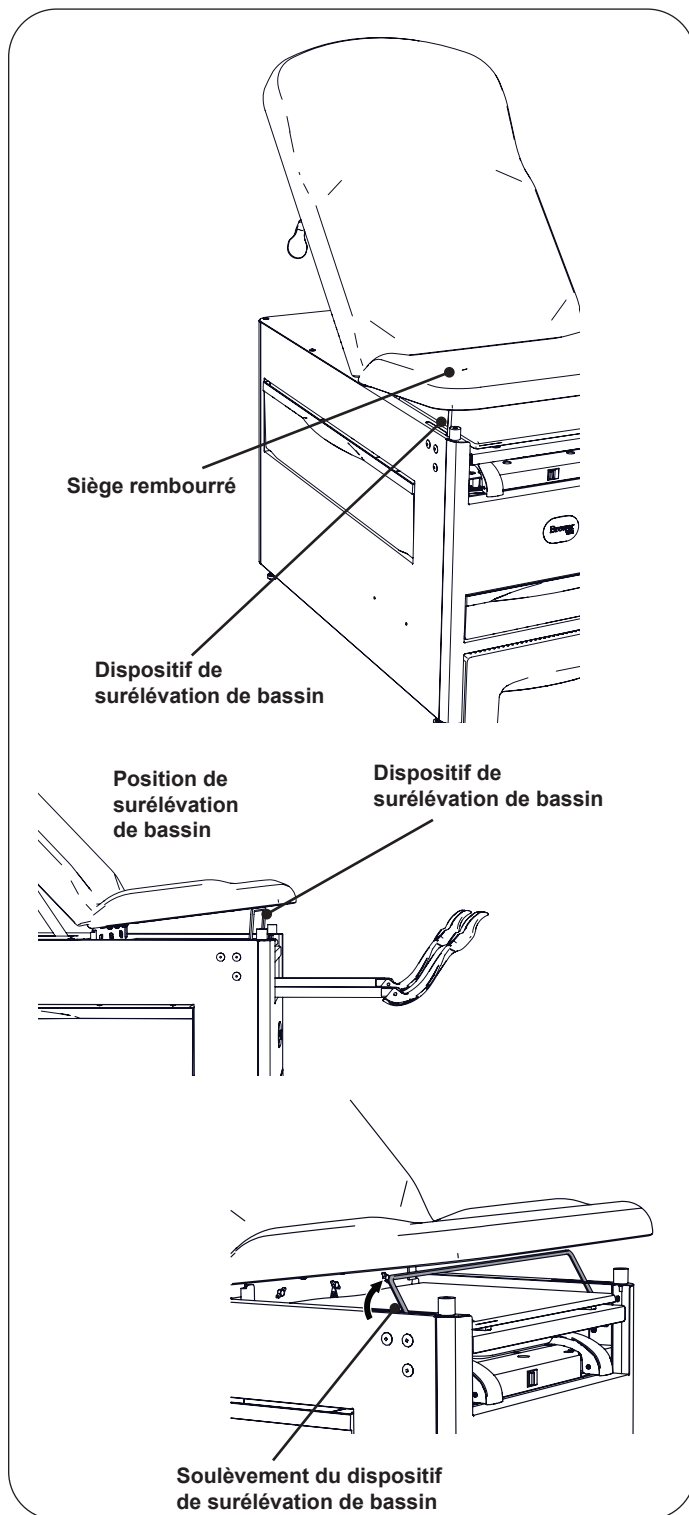


Figure 16. Barre de support de surélévation de bassin

RÉGLAGES DE LA TABLE (SUITE)

Tiroir chauffant (en option)

Le tiroir chauffant réchauffe le contenu du tiroir avant situé à l'extrémité inférieure de la table.

Pour mettre en service l'élément chauffant, mettre l'interrupteur d'alimentation correspondant à la position MARCHÉ ou « éclairée » (Figure 17). L'interrupteur s'allumera pour indiquer que l'élément chauffant fonctionne.

Pour éteindre l'élément chauffant, mettre l'interrupteur d'alimentation correspondant à la position ARRÊT ou « non éclairée ».

REMARQUE : L'élément chauffant est situé dessous le tiroir et applique de la chaleur rayonnante au contenu du tiroir. Les articles plus proches de l'élément chauffant seront plus chauds que ceux situés en haut du tiroir.

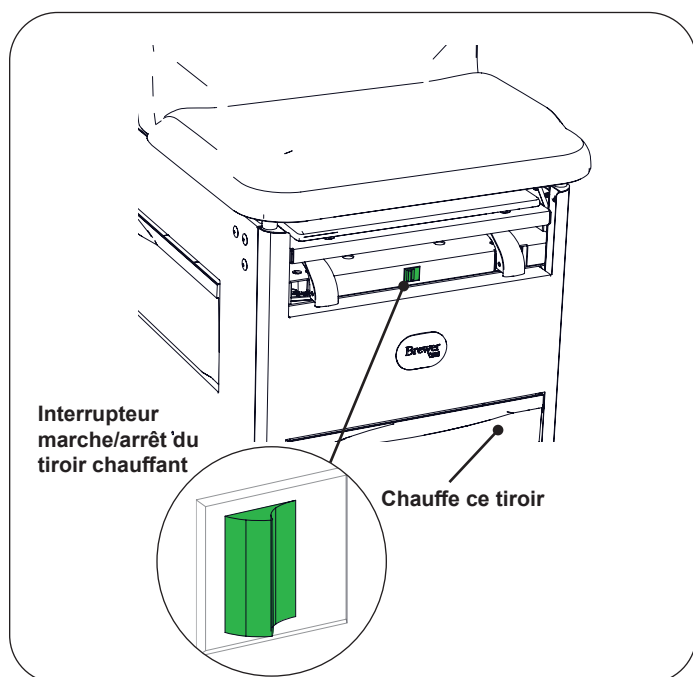


Figure 17. Interrupteur du tiroir chauffant

Prise électrique (en option)

Les modèles électriques sont équipés d'une prise électrique située sur le côté gauche de la table (Figure 18). La charge maximale totale qui peut être branchée dans la prise est de 2 A.



ATTENTION

Utiliser uniquement la prise jusqu'à l'intensité nominale de 2 A. Des rallonges et des barrettes de raccordement ne sont pas destinées à être utilisées.

AVIS : Intensité nominale maximale de la prise

Le branchement d'un appareil, dont la valeur nominale de courant est supérieure à 2 A, dans la prise située sur le côté de la table peut provoquer l'explosion du fusible à l'arrière de la table.

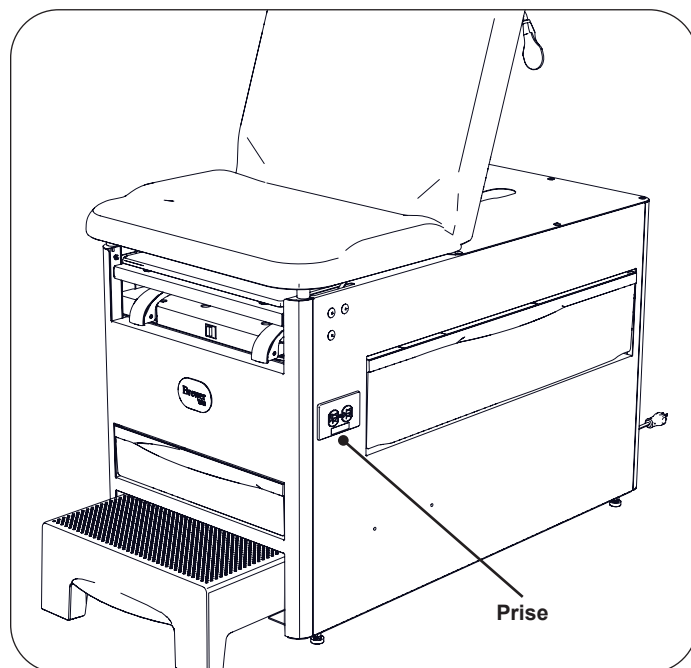


Figure 18. Prise de la table

ENTRETIEN

**AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique**

Avant de procéder à l'entretien de la table, couper l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la prise murale.

**ATTENTION**

Utiliser uniquement la prise pour fournir de l'énergie à un équipement destiné à faire partie du système électrique médical.

Entretien préventif**AVIS : Éléments de fixation desserrés et composants endommagés**

Pour éviter les dommages matériels, effectuer régulièrement des inspections de la table.

Contrôler la table tous les 6 mois.

- Examiner régulièrement le cordon électrique (s'il est présent) pour s'assurer de l'absence de coupures ou de dommages.
- Vérifier les fonctions mécaniques pour garantir un fonctionnement satisfaisant.
- Vérifier les éléments de fixation pour s'assurer qu'ils sont présents et serrés fermement.
- Lubrifier les pièces mobiles (telles que l'articulation du dossier) à l'aide d'un lubrifiant au silicone de qualité alimentaire. Recouvrir la zone environnante pour la protéger d'un excès de pulvérisation. Essuyer l'excès de lubrifiant. Ne pas lubrifier la barre ou le mécanisme de verrouillage dans la zone des étriers.

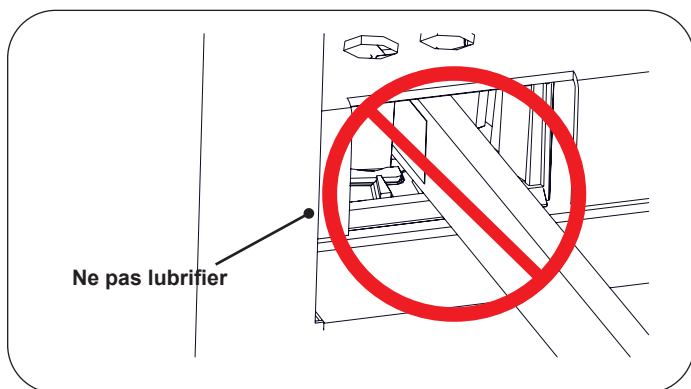


Figure 19. Ne pas lubrifier la barre ou le mécanisme de verrouillage

AVIS : Mauvais fonctionnement de la table

Si la table ne fonctionne pas bien, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise et aider le patient à descendre de la table. Procéder à une réparation de la table avant de l'utiliser.

Nettoyage de la table**AVIS : Essuyer les déversements immédiatement !**

Le matériau rembourré est résistant à la plupart des taches de type médicinal, mais il peut être endommagé par les solvants et les colorants. Éliminer les liquides renversés sur le revêtement immédiatement.

L'utilisation de produits de nettoyage inadéquats sur les tables Brewer peut diminuer la durée de vie de celles-ci. Toujours suivre les instructions de nettoyage et de désinfection de Brewer. Les instructions les plus récentes figurent sur le site brewercompany.com/resources/product-manuals/.

Enlèvement correct

Se conformer aux directives locales et régionales pour mettre au rebut correctement ce produit.

Les pièces métalliques peuvent être recyclées dans des installations de recyclage agréées. Les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés aux déchets généraux au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, s'adresser au revendeur.

ACCESSOIRES

Les accessoires autorisés à être utilisés avec cette table sont énumérés ci-dessous.

Description	Numéro de commande	Utilisation/Limitations
Séparateurs de tiroir avant	3500288	Séparateurs de tiroir avant pour séparation et organisation.
Système de bac collecteur urologique	100253	Collecte de manière commode et sûre les fluides pendant les interventions urologiques.
Bac à déchets en acier inoxydable	98464	Bac à déchets en acier inoxydable destiné à remplacer le bac à déchets en plastique standard.
Supports de genou articulés de luxe avec kit d'assemblage (installation sur place)	3500286	Les supports de genou aident au positionnement d'un patient sur la table d'examen.
Support de fixation pour lampe d'examen IV Welch Allyn Green Series™ (installation sur place)	3500398	Kit de support de fixation (installation sur place).
Support de fixation pour lampe d'examen IV Welch Allyn Green Series™ (installation en usine)	3500447	Support de fixation installé en usine.
Élément de fixation de papier destiné à la partie rembourrée pour adulte	3500305	Kit d'installation/de changement de la barrette de fixation de papier sur la table pour adultes.
Accoudoirs d'assistance (installation sur place)	3500287	Paire d'accoudoirs d'assistance et pièces de montage.

GARANTIE**Renseignements sur la garantie Brewer :**

Pour enregistrer ce produit Brewer, il suffit de se rendre sur le site brewercompany.com/warranty-registration, de remplir les champs de renseignements et de cliquer sur le bouton d'envoi. L'enregistrement de ce produit dès aujourd'hui permet une meilleure protection de cet investissement à l'avenir.

MANUELS DANS D'AUTRES LANGUES

Prière de consulter le site Web de l'entreprise Brewer brewercompany.com/versa-manuals pour obtenir des traductions de ce manuel dans plusieurs langues.



NOTES