



# Mode d'emploi Medibed



R

## Utilisation prévue

Votre lit médical Medibed est destiné à remplacer les lits domestiques. Il est conçu pour aider à donner de l'indépendance aux utilisateurs qui dépendent de l'assistance des soignants, à soulager la pression (en utilisant un matelas approprié) et à faciliter le transfert et les soins de l'utilisateur pour les soignants. Le lit est approuvé uniquement pour être utilisé/occupé par des personnes de plus de 12 ans, sous réserve d'évaluation.

---

*Ce modèle dispose de la fonction 'Trendelenburg' activée sur la télécommande et ne doit être utilisé que sous stricte surveillance médicale. Cette fonction est verrouillée à la livraison et ne doit être déverrouillée et utilisée que par des personnes qualifiées. Pour éviter tout risque de blessure grave, l'utilisateur ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsque le lit est en position Trendelenburg. La clé pour verrouiller ou déverrouiller les fonctions est fournie avec la télécommande. Veuillez la retirer du lit lors de la mise en service.*

## Conseils d'utilisation :

### Conseils de sécurité AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

- Vérifiez toujours l'état des pièces mécaniques mobiles pour garantir une utilisation en toute sécurité.
- Vérifiez que l'appareil a été correctement assemblé, en prêtant une attention particulière aux vis de verrouillage de la tête et du pied de lit et aux joints mécaniques en général.
- Toutes les goupilles de verrouillage de la plate-forme du lit doivent être solidement en place lorsque le lit est occupé.
- La zone sous le lit doit être totalement dégagée en tout temps.
- Le lit ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 12 ans, pesant plus de 175 kg (27,5 pierres) ou mesurant plus de 195 cm (6' 5").
- Assurez-vous que tous les câbles sont exempts de tout risque de pincement sur le lit. Si des câbles semblent endommagés, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez-les.
- Acheminer le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être écrasé, écrasé ou étiré par d'autres équipements autour du lit. Retirez toujours la prise secteur du mur lors du déplacement du lit.

### LORS DE L'UTILISATION :

- Assurez-vous que tous les freins des roulettes sont appliqués lorsque le lit est occupé.
- N'utilisez aucun appareil médical électrique sur les patients dans le lit.
- N'utilisez pas le lit à proximité d'équipements médicaux majeurs (rayons X, etc.).
- Lors de l'utilisation du lit, soyez conscient des environs du patient et du lit car un risque d'écrasement/enfermement pourrait être possible.
- Si le patient est en sous-poids, assurez-vous qu'il ne peut pas glisser entre le matelas et les barrières de lit. Utilisez des protecteurs/padding de barrières de lit si nécessaire.
- Assurez-vous que les barrières de lit sont verrouillées dans la position requise et sont parallèles au sol.
- Ne cherchez pas à atteindre des objets à travers les barrières de lit.
- N'utilisez pas le lit si un objet quelconque dépasse à travers les barrières de lit.
- Avant d'ajuster la hauteur du lit, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles empêchant un ajustement complet dans les deux directions.
- Vérifiez que tous les composants sont bien serrés et assurez-vous que tous les moteurs fonctionnent correctement avant utilisation.
- Laissez toujours le lit en position la plus basse lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter le risque de coincer quelque chose en dessous.
- NE PAS déplacer un lit occupé lorsque le cadre du matelas est élevé.
- NE PAS se tenir debout ou s'asseoir sur les barrières latérales car elles peuvent se casser, entraînant des blessures. Elles sont conçues pour empêcher l'occupant de tomber du lit.

## DEPLACEMENT D'UN LIT OCCUPE :

Il est recommandé que le lit soit inoccupé avant de le repositionner, mais si le lit doit être déplacé alors qu'il est occupé, la base de support du matelas doit être en position la plus basse, et tous les boutons de verrouillage du cadre doivent être verrouillés en position. La prise doit être retirée de l'alimentation secteur et tous les câbles/fils doivent être positionnés de manière à ne pas interférer avec les roulettes ou les personnes déplaçant le lit.

Assurez-vous toujours que les boutons de serrage et les vis de blocage qui maintiennent les cadres ensemble sont présents et bien serrés. Faites attention lors du déplacement du lit sur les seuils de porte. Assurez-vous que les roulettes de l'extrémité du lit sont parallèles au seuil et qu'une personne est située à l'avant du lit pour le guider sur le seuil. Si un mouvement ou une distorsion du cadre apparaît lors du déplacement initial du lit, cessez immédiatement l'opération et transférez l'utilisateur du lit, puis vérifiez le serrage des boutons de serrage et que les boutons de verrouillage du cadre sont verrouillés en position avant de continuer.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le lit doit être régulièrement vérifié pour s'assurer que tous les fixations sont sécurisées et que le châssis du lit est robuste et stable. Vérifiez les câbles pour l'usure ou les dommages et remplacez-les si nécessaire. Nous recommandons que l'entretien soit effectué sur une période de 12 mois pour assurer le bon fonctionnement du lit. Les lits qui sont fortement utilisés doivent être entretenus plus régulièrement. Seul un personnel qualifié et formé doit effectuer l'entretien et la maintenance.

- Retirez toujours la prise secteur du mur si vous nettoyez le lit.
- Évitez de mouiller les ensembles de moteurs pour éviter de causer des dommages.
- Pour éviter tout dommage lors du nettoyage du lit :

N'utilisez pas d'outils tranchants (couteaux ou grattoirs).  
N'utilisez pas de solvants agressifs.

N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression.

Utilisez un chiffon humide avec un agent de nettoyage doux, essuyez tout excès de solution de nettoyage qui pourrait s'accumuler sur les surfaces en bois.

Les nettoyeurs domestiques ne doivent être utilisés que sans agents abrasifs. N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcalins ou de benzène sur les surfaces en bois.

Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire en utilisant des désinfectants, suivez les instructions du fabricant.

## Garantie :

Ceci certifie que votre produit Medibed est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie n'est pas transférable. En cas de défaut ou de problème de fonctionnement pendant cette période, le détaillant auprès duquel le produit a été acheté doit être contacté immédiatement. Le non-enregistrement du défaut peut invalider la garantie. Le détaillant auprès duquel le produit a été acheté est responsable de toute réparation sous garantie.

Medipost garantit que si un défaut se produit pendant cette période en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux, le produit sera réparé (ou remplacé à la discrétion de l'entreprise) gratuitement. Les déplacements ne seront pas pris en charge. Toute modification non autorisée annulera la garantie. Les pièces qui sont soumises à une usure normale, à des dommages accidentels, à la négligence ou à un usage inapproprié sont exclues de cette garantie

## INSTRUCTIONS POUR UNE ÉLIMINATION CORRECTE CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE :




À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains normaux. Il doit être remis aux installations de collecte des déchets séparés municipales, ou à des revendeurs appropriés qui fournissent ce service. L'élimination des déchets séparés aide à réduire les effets négatifs possibles sur l'environnement et la santé résultant d'une élimination incorrecte et permet de recycler les matériaux composant le produit, ce qui se traduit par des économies d'énergie et de ressources significatives.

Le produit porte le symbole de la poubelle barrée pour souligner l'obligation de disposer séparément des équipements électromédicaux.

## 2. Montage

### 2.1 Liste des composants :

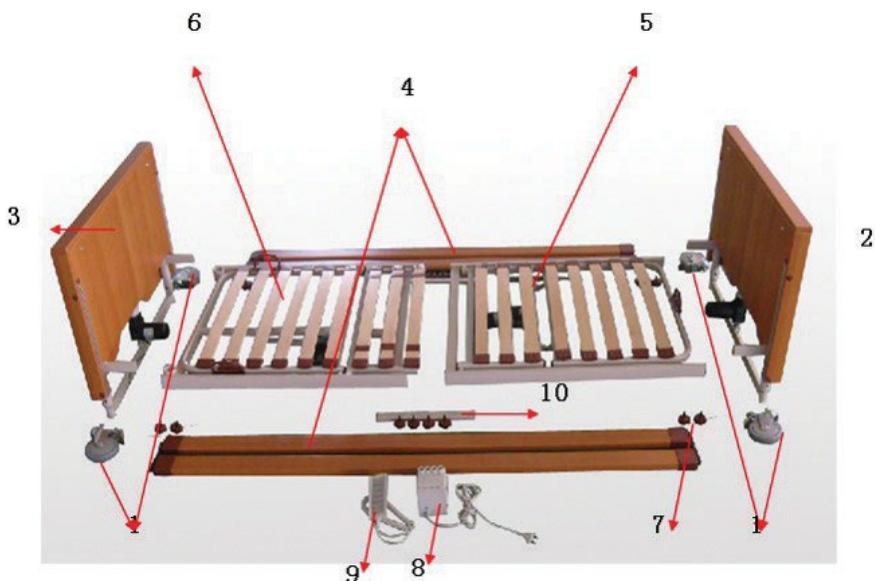

Article	Nom	Qté
1	Roulettes	4
2	Tête de lit et sous-ensemble du vérin "H"	1
3	Pied de lit et sous-ensemble du vérin "H"	1
4	Rails latéraux	4
5	Sous-ensemble du cadre de lit avec dossier	1
6	Sous-ensemble du cadre de lit avec pliage inférieur	1
7	Vis de fixation	4
8	Boîte de contrôle T-Motion	1
9	Contrôleur manuel T-Motion	1
10	Barres de connexion en acier	2

## 2.2 Processus d'installation

(A) Installer le pied et la tête de lit (2 et 3) sur le sous-ensemble du cadre de lit (5 et 6) : Placer la tête et le pied de lit (2 et 3) contre un mur avec les freins appliqués. (2) et (3) sont identiques, donc l'un ou l'autre peut être utilisé à chaque extrémité. Ouvrir le mécanisme de verrouillage à ressort pour permettre l'application du cadre de lit comme indiqué.



Ensuite, localisez les languettes métalliques du cadre de lit dans les encoches de réception à l'extrémité du lit et appuyez fermement vers le bas pour qu'elles s'enfoncent jusqu'au fond.



Veillez à fermer le mécanisme de verrouillage à ressort en position verrouillée



(A) Connecter le sous-ensemble du dossier du cadre de lit (5) au (6) : Soulever le sous-ensemble du cadre de lit à l'extrémité du pied, et insérer les barres de connexion en acier (10) dans le tube du cadre de lit. Utiliser les vis de fixation (7) pour sécuriser le tout, en serrant à la main.

Les barres de connexion en acier sont situées sur le cadre de transport lors de la livraison.



Veillez noter : serrez les vis.

(A) Connectez l'assemblage de l'extrémité du pied du cadre de lit (6) au cadre de lit avec dossier (5). Veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées.

## 2.2 Connecter les fiches pour les moteurs et le contrôleur manuel


Prise du  
moteur  
de  
levage  
11

Prise du  
moteur  
de  
levage 2

Prise du  
moteur de  
pliage des  
jambes/gen  
oux


Prise du  
moteur  
du  
dossier

Prise du contrôleur manuel

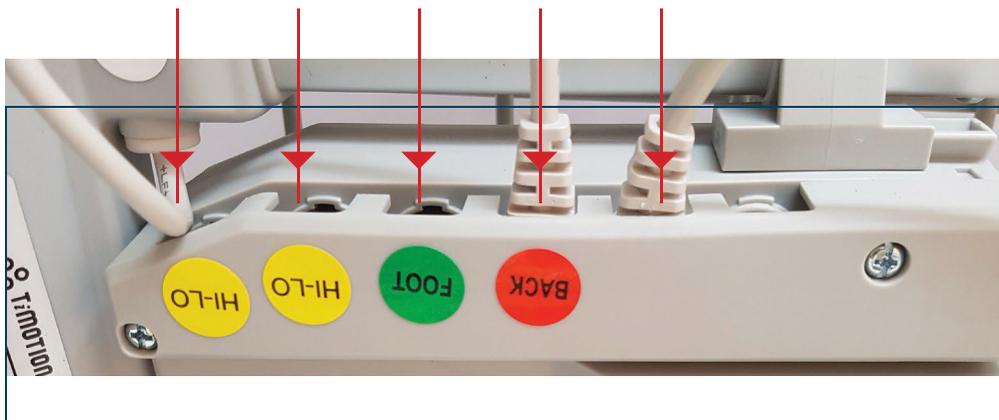

La boîte de contrôle (8) est déjà installée sur le sous-ensemble du cadre de lit (6). Localisez les fiches des 4 moteurs et du contrôleur manuel (9) et insérez-les fermement dans les prises appropriées comme indiqué sur l'image ci-dessus

Assurez-vous que les câbles passent à travers les supports aux extrémités du lit.

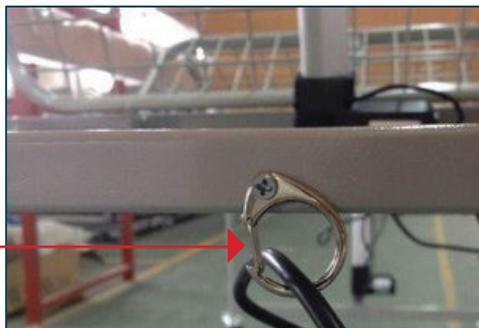

Assurez-vous que la clé de sécurité est branchée sur le côté du contrôleur manuel.

### 2.3 Assemblage des rails latéraux (4)

Ensuite, branchez le câble d'alimentation sur le secteur et allumez-le au mur. Soulevez le lit pour permettre l'installation des rails latéraux. Appuyez sur le bouton et insérez la première partie du glisseur dans l'alliage d'aluminium en veillant à ce que la pointe du glisseur soit orientée vers le haut.



Insérez les doigts en plastique des glisseurs dans les rails latéraux, puis fixez l'autre glisseur à l'autre extrémité des rails latéraux comme indiqué :



Terminez en insérant l'autre glisseur dans l'alliage d'aluminium et en soulevant les rails latéraux à la position la plus élevée.

## SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Medipost décline toute responsabilité pour toute utilisation, modification ou assemblage du produit autre que ceux indiqués dans ce manuel d'utilisation. Les accessoires non mentionnés dans ce manuel ne doivent pas être utilisés. Le lit Medibed respecte toutes les exigences concernant les distances maximales. Cependant, si le lit est utilisé pour le soin de patients ayant des dimensions corporelles petites, il doit être particulièrement noté qu'il existe un risque que de tels patients glissent à travers les ouvertures entre les rails latéraux ou entre le rail latéral et le support de matelas. Le lit ne doit pas être utilisé par des patients de moins de 12 ans, ou par des patients ayant une taille corporelle équivalente à celle d'un enfant de 12 ans en moyenne ou plus petite.

Le lit, en combinaison avec les rails latéraux, ne doit pas être utilisé pour des personnes pesant moins de 45 kg ou mesurant moins de 150 cm. Ni pour des personnes agitées (spasmes) ou confuses, à moins qu'une évaluation des risques professionnelle ait été effectuée et acceptée. Lors de l'utilisation des rails latéraux, il est essentiel de s'assurer d'un montage correct; sinon, il y a un danger de coincement/suffocation entre le support de matelas, le rail latéral et

l'extrémité du lit. Ne placez aucun objet sous le lit. Assurez-vous qu'il n'y a rien en dessous, au-dessus ou à proximité du lit qui puisse limiter le mouvement du lit ou du support de matelas, comme des meubles, des cadres de fenêtre ou des boîtes de rangement. Abaissez toujours le lit à la position la plus basse avant de laisser le patient dans le lit sans surveillance. Après l'assemblage, vérifiez toujours que le lit est pleinement fonctionnel avant de placer un patient dans le lit.

Medipost

Rue Ernest Solvay 27

4000 Liège

BELGIQUE

[www.medipost.shop](http://www.medipost.shop)