



# DENTO-VIRACTIS 57 ROTARY INSTRUMENTATION

# DENTO-VIRACTIS

Prêt à l'emploi

<b>Description</b>	Dento- Viractis 57 est recommandé pour <b>nettoyage et de désinfection des fraises et l'instrumentation rotative</b> avant stérilisation.
<b>Domaines d'application</b>	Usage sur les fraises et instruments rotatifs souillées réutilisables.
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Décroche les souillures</b> protéiques et minérales</li> <li>✓ Contient un <b>agent anti-corrosion</b></li> <li>✓ Produit <b>prêt à l'emploi</b></li> <li>✓ <b>Compatible avec les bacs à ultrasons</b></li> </ul>
<b>Présentation commerciale</b>	Le flacon de 2 litres de solution prête à l'emploi Le bidon de 5 litres de solution prête à l'emploi

Activité antimicrobienne			Temps de contact
<b>Bactéricide</b>	EN 1040	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	5 min
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	15 min
	EN 14561		15 min
<b>Fongicide</b>	EN 1275	Candida albicans,	15 min
	EN 13624	Candida albicans, Aspergillus Niger	15 min
	EN 14562		15 min
<b>Virucide</b>	Hépatite B		10 min
	Herpès virus simplex type 1 selon EN 14476		15 min
	BVDV (virus modèle HCV) selon EN 14476		15 min
	NF T 72-180	Enterovirus polio 1, Adenovirus type 5, Orthopoxvirus de	15 min



# DENTO-VIRACTIS ROTARY INSTRUMENTATION 57

# DENTO-VIRACTIS

<b>Composition</b>	Alcool éthylique, Hydroxyde de potassium, Alcool ethoxylé.
<b>Précautions</b>	Contient de l'HYDROXYDE DE POTASSIUM, du D-LIMONENE et du LINALOOL. Peuvent déclencher une réaction allergique
<b>Mode d'emploi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Immerger les instruments dans la solution Dento-Viractis 57.</li><li>2. Temps de contact : 15 minutes.</li><li>3. Rincer.</li></ol> <p>La solution sera renouvelée dès qu'elle est souillée ou au plus tard tous les jours.</p>

#### Phrases de risque :

- R10 : Inflammable.
- R22 : Nocif en cas d'ingestion.
- R34 : Provoque des brûlures.

#### Phrases de sécurité :

- S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

#### Etiquetage :



Marquage CE0120 obtenu en 2008. Version de la fiche: 2.0 du 18/10/2017

**CE** **HYGITECH**  
www.hygitech.com  
109 bis avenue Charles de gaulle  
92200 Neuilly sur Seine - FRANCE  
Tel: +33 (0)1 48 01 32 89