

Set de perfusion Cleo[®] 90

La perfusion "Tout-en-Un"



Connectez-vous
en douceur

3 gestes...

pour une insertion simple, rapide et sûre !

1 Dévisser le capuchon



2 Insérer la canule

Presser jusqu'à l'obtention d'un clic puis maintenir 5 secondes.



Retirer le boîtier d'insertion

3 Attacher la tubulure



Système "Tout-en-un"

Son boîtier unique breveté intègre à la fois un introducteur et un cathéter.

Le set de perfusion prémonté Cleo® 90 rend ainsi les insertions plus simples et plus rapides.

Sûr

Le set de perfusion Cleo® 90 est un cathéter possédant un système d'aiguille protégée. Après insertion de la canule, l'aiguille se rétracte automatiquement dans son boîtier pour réduire le risque d'incidents liés à une piqûre accidentelle.

Flexible

Le système Flex-Attach permet de réaliser une rotation sur site de 360°, vous offrant une plus grande liberté vestimentaire.

Les avantages du set de perfusion Cleo® 90

sont clairs !



Système d'aiguille protégée

L'aiguille se rétracte automatiquement dans le boîtier après insertion, réduisant le risque d'incidents liés à une piqûre accidentelle.

Premier « Tout en un »

Le boîtier breveté contient à la fois un inserteur de la canule et un rétracteur d'aiguille, pour un geste simplifié et sécurisé.

Aiguille d'insertion cachée

L'aiguille est protégée à toutes les étapes de la pose du cathéter.

A aucun moment, le poseur n'a de contact avec l'aiguille, même visuellement.



Pansement hypoallergénique

L'adhésif transparent laisse la peau respirer.

Imperméable à l'eau, il assure une bonne adhésion à la peau.

Connexion de 360°

Vous pouvez varier la connexion à la tubulure de 360°, ce qui vous offre encore plus de liberté dans votre choix vestimentaire.

Variété de taille

Disponibles en longueur d'aiguille de 6 et 9 mm et en longueur de tubulure de 60, 80 et 110 cm.



Connexion Luer Lock standard

Compatible quelle que soit le modèle de pompe à insuline munie d'un système de connexion ouvert.

Smiths Medical,

une gamme complète de sets de perfusion

adaptée aux besoins de chacun...

Set de perfusion Cleo® 90
Cathéters à angle droit

Référence article	Longueur canule en mm	Longueur tubulure en cm
21-7220-24	6	60
21-7221-24	6	80
21-7222-24	6	110
21-7230-24	9	60
21-7231-24	9	80
21-7232-24	9	110

Présenté en boîte de 10 kits complets



Set de perfusion Cleo® 90 - Dispositif médical de classe IIa - **FABRICANT** : Smiths Medical, Inc (USA) - Représentant européen : Smiths Medical International, Ltd (UK) - **ORGANISME NOTIFIÉ** : INTERTEK (CE0473) - **INDICATIONS** : Le set de perfusion Cleo® 90 est un set de perfusion pour pompes à insuline, à insertion angulaire à 90°, muni d'une connexion Luer Lock normalisé, facilement déconnectable et reconnectable au niveau du pansement. **Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.**

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Documentation destinée aux professionnels de santé.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L'IMPRESSION.
SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex
Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 30
e-mail : morl.info@smiths-medical.com
www.smiths-medical.fr

MPAUC-1135

CE
0473

smiths medical

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions du manuel d'utilisation pour une description détaillée du produit et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Cleo 90 et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays.
©2015 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193873FR-022015