

Bandage user manual

Mode d'emploi du bandage - Gebruiksaanwijzing verband
- Gebrauchsanweisung andage



1. Place pad on wound

Placer le bandage sur la plaie

Leg het verband op de wond

Den Verband auf die Wunde legen



2. Insert bandage cross v-notch

Insertion d'un bandage croisé avec encoche en V

Inzet verband kruis v-notch

Einsatz Binde Kreuz V-Kerbe



3. Tighten bandage over notch

Serrer le bandage

Trek het verband aan

Den Verband festziehen



4. Fix bandage reversely

Fixer le bandage à l'envers

Fixeer het verband omgekeerd

Bandage umgekehrt befestigen



5. Firmly wrap bandage covering all edges of pad

Envelopper fermement le bandage en recouvrant

tous les bords du pad

Wikkel het verband stevig om alle randen van het kompres

Wickeln Sie den Verband fest um alle Kanten des Kissens



6. Secure safety hook into bandage

Fixez le crochet de sécurité dans le bandage

Maak de veiligheidshaak vast in het verband

Sicherheitshaken in der Bandage befestigen